

move

April 2022



Generation Plus
Mehr Mobilität im Alter

Kompressionsstrümpfe
Erfolgreiche Ödemtherapie

Individuelle Fussbettung
Flip-Flops nach Mass

Knöchelgelenke
Dynamische Begleiter im Alltag

Schuhtechnik
Neu bei Jamans

Generation Plus

Mehr Mobilität im Alter



Gerade im Alter ist der Erhalt der Bewegungsfähigkeit die Basis, weiter aktiv am Leben teilhaben zu können. Jamans Orthopädie-Technik unterstützt ältere Menschen dabei, die Anforderungen des Alltags besser bewältigen zu können.

Jamans Orthopädie-Technik hat eine spezielle Produktlinie zusammengestellt, welche in Handhabung und Produktdesign Menschen mit eingeschränkter Greiffähigkeit, weniger Kraft oder beeinträchtigtem Bewegungsapparat unterstützt.

Gerade im Alter ist der Erhalt der Bewegungsfähigkeit die Basis, weiter aktiv am Leben teilhaben zu können. Die Produkte der Generation-Serie unterstützen ältere Menschen dabei, den Anforderungen des Alltags besser begegnen zu können. Sie ermöglichen den Erhalt der Selbstständigkeit und der eigenen Mobilität. Und somit bleibt die aktive Teilnahme am sozialen Leben möglich.

Die Produkte aus der Generation-Serie sind aber auch einfach an- und auszuziehen und äusserst angenehm im Tragekomfort. Sie stabilisieren und entlasten die Gelenke und sorgen für sicherere und schmerzfrei



Bewegungen. Beim Tragen einer Osteoporose-Orthese tritt bspw. ein sofortiger Aufrichtungseffekt ein.

Die Bandbreite der Produkte aus der Generation-Serie ist sehr vielfältig. Sie reicht von stabilisierenden Schienen, Handgelenksorthesen, Hüftprotektoren, Rückenbandagen und -orthesen über Knie-, Knöchelbandagen und -orthesen bis zu Fusschienen (Hallux Valgus), Fussstützen und Fusshebern.

Kontaktieren Sie uns und überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung und der schnellen Wirksamkeit der Produktserie «Generation».

Ansprechperson:

Barbara Guler
Medizinprodukteberaterin
062 822 62 82
jamans@ortho-group.ch

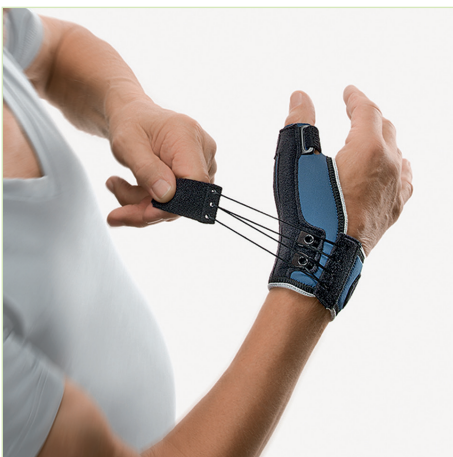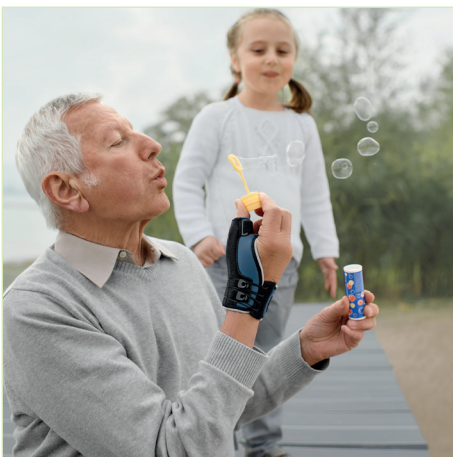

Kompressionsstrümpfe

Die perfekte Ergänzung für eine erfolgreiche Ödemtherapie



Auch wenn tagsüber Kompressionsstrümpfe das Ödem optimal versorgen, kommt es am Abend nach dem Ablegen der Kompressionsversorgung unter Umständen zu neuerlichen Schwellungen oder anderen schmerzhaften Beschwerden. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass der JOBST Relax so entwickelt wurde, dass er auch zum Schlafen getragen werden kann.

Therapeutischer Einsatz für alle Ruhe- und Nachtphasen

JOBST Relax ist als Ergänzung zu tagsüber getragenen Kompressionsstrümpfen entwickelt worden. JOBST Relax wird während der Erhaltungsphase eingesetzt mit dem Ziel, die Ödemreduktion aufrechtzuerhalten und nächtlicher Flüssigkeitsansammlung entgegenzuwirken. Die strukturierte Oberfläche des Gestricks bewirkt bei Bewegung einen Mikromassage-Effekt.


Angenehmer Tragekomfort

JOBST Relax wird nach den individuellen Körpermassen auf Flachstrickmaschinen angefertigt. Coolmax-Fasern und modernste Stricktechnik tragen zu einer verbesserten Atmungsaktivität bei und beeinflussen in positiver Hinsicht den Tragekomfort. Das flache Design sowie das ansprechende Farbangebot (rosa und beige) machen JOBST Relax zu einer modernen Kompressionsversorgung.

Komfortable Nachtruhe

Die Monofilament-Zwischenschicht sorgt für einen Dämpfungseffekt und verleiht den Trägern ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit während der Ruhe- und Nachtphase.

Versorgungsvarianten

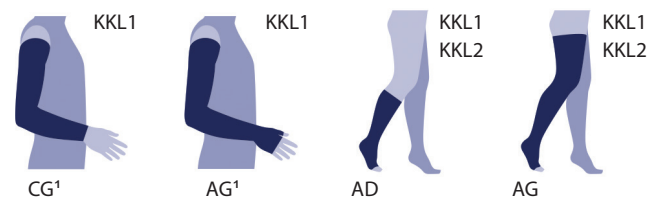

Ansprechperson:

Rebekka Wernli, Medizinprodukteberaterin
062 822 62 82, jamans@ortho-group.ch

Individuelle Fussbettung

Flip-Flops und Gesundheitssandalen nach Mass

Der Sommer kann kommen. Der Kunde wählt das Design, und wir machen den Rest. Neu bieten wir Flip-Flops und Gesundheits-Sandalen mit individuellen Fussbettungen und der Möglichkeit der Integration von weiteren orthopädischen Korrekturen wie beispielsweise Beinlängenausgleichen und Beinachsenkorrekturen.



Gerade in der warmen Jahreszeit möchten Patienten, welche Schuheinlagen tragen, nicht auf offenes Schuhwerk verzichten. Nicht immer können die bestehenden Möglichkeiten, wie zum Beispiel Sandalen für lose Einlagen, den modischen Ansprüchen unserer Patienten gerecht werden. Gerade die jüngere Generation verlangt nach modischen Lösungen. Die Glabbal-Flip-Flops und die Glabbal-Gesundheitssandalen bieten die Möglichkeit, die anatomischen Erfordernisse und modische Ansprüche zu vereinen.

Durch Scannen der Füße oder auch mittels Trittschaumabdruck werden die Fussmasse ermittelt. Fussfehlstellungen werden ersichtlich und können korrigiert werden.

Die massgeschneiderte Fussbettung wird nun in das zuvor ausgewählte Schuhmodell integriert und als solches unsichtbar gemacht. Für die Herstellung der Flip-Flop-Sandalen werden hochwertige Materialien aus der Orthopädie-Technik verwendet. Diese sind langlebig, schadstoffgeprüft und haben antibakterielle Eigenschaften.

Jeder Inhaber einer solchen Sandale hält eine individuelle Einzelanfertigung in den Händen, welche das Gehen in offenen Schuhen zum Genuss werden lässt.

Ansprechperson:

Matthias Schulz, Orthopädietechnik-Meister
062 822 62 82, matthias.schulz@ortho-group.ch



Knöchelgelenke

Dynamische Begleiter im Alltag

Die muskulären Defizite bei neurologischen Erkrankungen reichen von einer Teillähmung bis zum kompletten Ausfall der Beinmuskulatur. Um auch in diesen Fällen ein möglichst physiologisches Gangbild zu erreichen, bieten Knöchelgelenke heute unterschiedlichste Einstellmöglichkeiten.

Angelehnt an die Gangphasen des Schrittzyluses, werden die Gelenke mit verschiedenen Feder- oder Anschlagselementen bestückt. Damit kann auf die individuelle Situation des Betroffenen sehr spezifisch eingegangen werden. Insbesondere die Schwäche der fussenkenden Muskulatur verunmöglicht ein physiologisches Gehen und hat weitreichende Konsequenzen auch für das Kniegelenk mit dazugehörigen Muskeln.

Hatte man früher nur die Option, über einen statischen Dorsalanschlag ein kniesticckendes Drehmoment zu erreichen, können heute über verschiedene Federmodule Widerstände dynamisch und stufenlos eingestellt werden. Die Folge ist ein effizienteres und physiologischeres Gangbild. Natürlich sind die gleichen Optionen auch bei insuffizienten Fusshebern einsetzbar.

Das Ziel der neuesten Knöchelgelenkgeneration ist es, über den initialen Bodenkontakt der Ferse eine kontrollierte Plantarflexion einzuleiten und im Übergang

zur frühen Phase der mittleren Standphase ein sanftes, kniesticckendes Drehmoment zu erreichen.


In der mittleren Standphase soll eine möglichst sichere und energiesparende Situation erreicht werden, die sich in der Vorschwungphase in eine Energiegewinnung wandelt, um dann in einer gut unterstützten und energierückgebenden terminalen Standphase zu münden. Die sofortige Umkehr der aktiven Plantarflexion zu einer aktiven Dorsalextension im Übergang von der terminalen Standphase zur initialen Schwungphase wird, soweit das die mechanischen Elemente zulassen, nachvollzogen.

Um den Rehabilitationsprozess begleiten zu können, sind die Funktionsmodule nach Bedarf komplett austauschbar.



Gelenkübersicht Systemknöchelgelenke



	NEURO CLASSIC	NEURO SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO VARIO-SPRING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING H ₂ O
DORSALANSCHLAG	statisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	Dorsalextensionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Dorsalextensionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
PLANTARANSCHLAG	statisch	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
	Plantarflexionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
	Plantarflexionswinkel einfeilbar am Systemfußbügel	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
wasserfest 	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



Ansprechperson:
 Matthias Schulz
 Orthopädietechnik-Meister
 062 822 62 82
matthias.schulz@ortho-group.ch

Neu bei Jamans

Schuhtechnik nach Mass

Um unseren Kundenservice weiter zu verbessern und der steigenden Nachfrage in unserem Geschäft gerecht zu werden, haben wir den Bereich Schuhtechnik mit unserem Spezialisten, Lukas Jakob, Orthopädienschuhmacher-Meister erweitert.

Fusskompetenz aus einer Hand

Lukas Jakob sorgt mit seinem Team mit viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung dafür, dass sich unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag etwas mehr Mobilität zurückerobern können. Viele Beschwerden der Füsse und des Bewegungsapparates lassen sich mit den richtigen Schuhen aus der Welt schaffen oder massgeblich lindern. Beispielsweise mit:

- Mass-Schuhen
- Orthopädische Serienschuhen
- Schuheinlagen nach Mass
- Spezialschuhen
- Verbandsschuhen
- Schuhzurichtungen
- Schuhreparaturen
- Zehenorthesen nach Mass

Bei uns finden Sie ziemlich alles, was es an gesundem Schuhwerk oder entsprechenden Lösungen für Ihre Schuh- und Fussprobleme gibt.

 **BECKER**
Orthopädie-Technik
Schaffhauserstr. 18
8006 Zürich
Tel. 044 363 85 31
becker@ortho-group.ch

 **SCHMID**
Orthopädie-Technik
Birmensdorferstr. 198
8003 Zürich
Tel. 044 463 90 55
schmid@ortho-group.ch

 **RÄDGE**
Orthopädie-Technik
Bahnhofstr. 36
8304 Wallisellen
Tel. 044 830 64 44
raedge@ortho-group.ch

 **JAMANS**
Orthopädie-Technik
Rathausgasse 3
5000 Aarau
Tel. 062 822 62 82
jamans@ortho-group.ch

Administration:
Ortho Group AG
Kreuzstrasse 46
8008 Zürich
Tel. 044 266 61 66
info@ortho-group.ch
www.ortho-group.ch

